



## Atemluftmengen – Messgerät

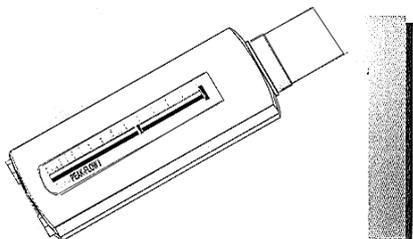

Platzieren Sie den Cursor  
auf die Zone. Atmen Sie tief ein, Kinn  
gehoben.  
Indem Sie das Mundstück fest in den  
Mund nehmen, blasen Sie  
schnell und so kräftig wie möglich  
in das Gerät hinein.

**Handhabung**

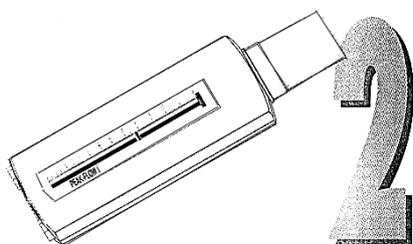

Machen Sie drei Messungen.  
Ruhen Sie sich nach jeder Messung  
aus.  
Notieren Sie dann den besten Wert auf der

**2 Jahre Garantie**

- Nicht in das Gerät wie in ein  
Blasrohr blasen.

- Der Cursor muss frei beweglich  
sein.

- Verstopfen Sie nicht die  
Luftausgänge.

- Manipulieren Sie nicht an den  
Schrauben (nicht los- oder  
festschrauben!)



- Spülmaschinenfest
- Sterilisation aber nur kalt
- Pflegemittel: Wasser und Seife
- nicht in kochendes Wasser legen

**Pflege**

**Standardmodell:**  
**Grundmodell: 400 l/min Maxi**


**800 l/min Maxi**  
**CIP = 660351-5**

**CIP = 659765-4**

**Einfache**  
**Handhabung**


Atemluftmengen – Messgerät - Best.- Nr. 2012996

Einfache Handhabung    Optimaler Bereich    unverlierbarer Cursor    universeller Ansatz + Abdeckung des Ansatzes

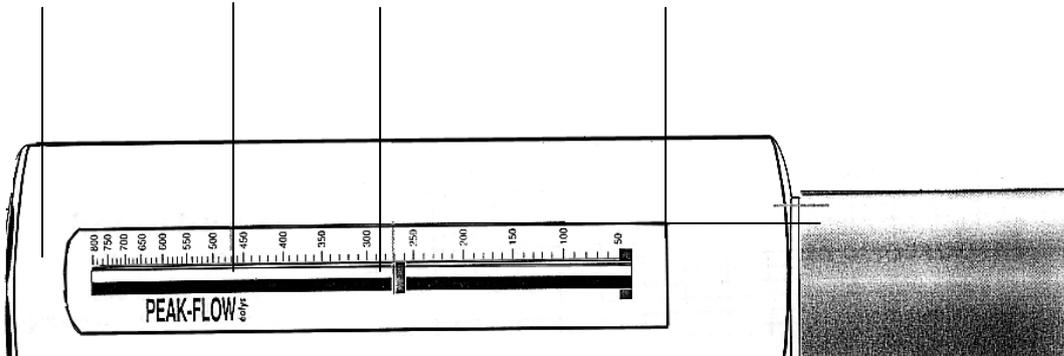


**Normalitätsintervall**

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen ihres Arztes; notieren Sie ihre normalen Werte.

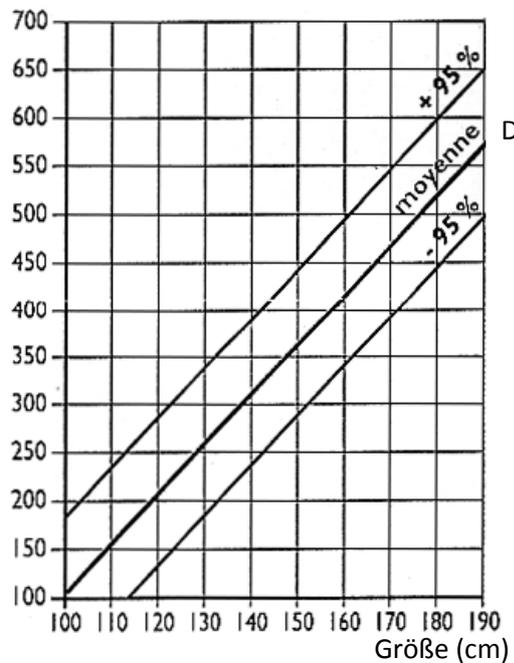

**Benutzung der Skala**

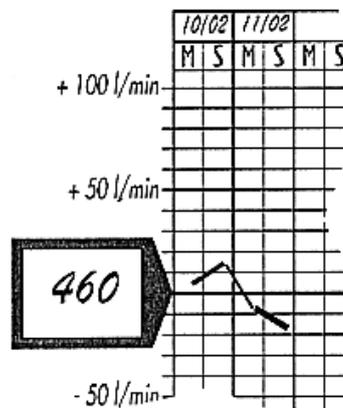


Atemluftmengen – Messgerät - Best.- Nr. 2012996

**Ergebnisskala**

Name: .....

Alter: .....

Größe: .....

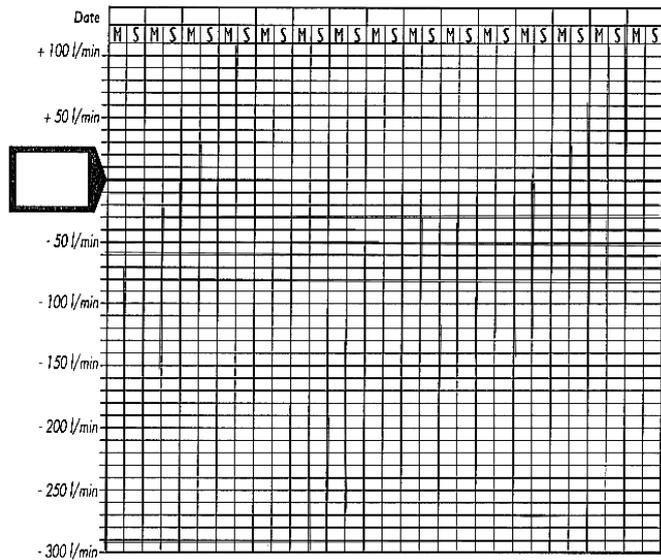

**Ausfüllen der Skala**

- Machen Sie insgesamt 3 Messungen.

**Wichtig!**

Falls Sie eine Abnahme feststellen sollten, nehmen Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.

